

Ficha técnica

NO-STING SKIN-PREP[◇], protector cutáneo no irritante estéril en spray, toallita y torunda aplicadora.



Características

- **Barrera tópica efectiva**, forma una película que protege la piel.
- **Ayuda a preservar la integridad de la piel**, proporciona una barrera efectiva de hasta 72 horas de duración y previene el posible dolor e irritación durante la retirada de productos adhesivos.
- **Protege la piel intacta o dañada** de la irritación causada por la orina y/o incontinencia fecal, jugos gástricos y drenaje de heridas, adhesivos y fricción.
- **Hipoalergénico**, el producto es apto para su uso en personas adultas, niños y bebés recién nacidos.
- **No irritante**, está formulado sin alcohol para reducir el riesgo de picor en piel dañada.
- **Facilita la adhesión de apósitos**, esparadrapos, tubos de drenaje, catéteres externos, dispositivos de ostomías.
- **Se aplica fácilmente**, incluso en zonas difíciles como codos, rodillas o talones.
- **Se adapta de forma natural a la piel del paciente**, y permite el movimiento sin que la piel se agriete o pele.
- **Puede utilizarse en zonas muy sensibles** como es el caso de la piel periestomal.
- **Fórmula densa**, sólo es necesaria una aplicación para crear una capa protectora.
- **Tras su aplicación se seca en 30 segundos**
- **Aumenta el confort** del paciente y facilita el trabajo a los profesionales y a los cuidadores.

Descripción

NO-STING SKIN-PREP[◇] es un líquido estéril con un solvente no irritante que en contacto con el aire forma una barrera protectora en forma de película que se seca rápidamente.

Indicaciones

NO-STING SKIN-PREP[◇] está indicado para la protección de la piel ante la fricción, frente a productos adhesivos, tales como apósitos adhesivos, esparadrapos, dispositivos de ostomías etc., así como ante productos orgánicos que puedan lesionar la piel (orina, heces, exudado). En condiciones normales sólo se requiere de una aplicación por cura. En los casos en los que se necesite una protección máxima se pueden realizar dos aplicaciones.

Composición

Copolímero de acrilato de hexametildisiloxano
No contiene látex, fragancias, productos de origen animal ni conservantes.

Precauciones

- Producto para uso externo.
- No utilizar en pacientes con alergia o sensibilidad conocida a alguno de los ingredientes del producto.
- En caso de que aparezca algún signo de irritación o sensibilización hay que suspender la utilización y consultar a un profesional sanitario.
- Este producto no está recomendado para ser utilizado en zonas sensibles como alrededor de la cara o de los ojos sin la supervisión de un profesional sanitario. En el caso de que haya un contacto accidental con los ojos hay que lavarlos bien con agua abundante (incluso de bajo de los párpados).
- No aplicar directamente encima de heridas abiertas o heridas de punción profundas.
- No aplicar en áreas infectadas.
- El contenido de la botella de spray es estéril hasta su primer uso.

NO-STING SKIN-PREP[◊], protector cutáneo no irritante estéril en spray, toallita y torunda aplicadora.

Modo de empleo

Seguir las instrucciones de uso del médico, enfermera o profesional sanitario. En caso contrario, seguir el modo de empleo descrito a continuación.

1-Antes de la aplicación de NO-STING SKIN-PREP[◊] la piel debe estar limpia y seca.

2. Aplicador de torunda o toallita: Aplicar una capa uniforme sobre todo el área que desea protegerse.

Aerosol: Sujetar la boquilla del aerosol una distancia de 10 a 15 cm de la piel y aplicar una capa lisa y uniforme de la película sobre todo el área que desee protegerse, mientras mueve la boquilla con un movimiento amplio.

3. NO-STING SKIN-PREP[◊] se seca en aproximadamente 30 segundos. Si no ha aplicado el aerosol en todo el área que desea cubrir, espere a que el área original de aplicación se haya secado y volver a aplicar en el área no cubierta.

4. Para ofrecer la máxima protección, puede volverse a aplicar una segunda capa de NO-STING SKIN-PREP[◊] y dejarse secar antes de tapar el área con un apósito u otro producto adhesivo.

5. Si NO-STING SKIN-PREP[◊] se aplica sobre un área de pliegues de la piel u otro contacto piel-piel, asegurarse de que las áreas de contacto de la piel están separadas a fin de permitir que la capa se seque completamente antes de volver a la posición normal.

6. Cuando se utilice debajo de productos adhesivos, es necesario volverlo a aplicar cada vez que se cambie el producto ya que el adhesivo puede quitar la película.

Asegurarse de que NO-STING SKIN PREP[◊] esté seco antes de aplicar los productos adhesivos.

7. Cuando se utilice como barrera protectora contra líquidos corporales, heces, orina, etc., y no se apliquen productos adhesivos sobre la piel:

a) Se recomienda volver a aplicar NO-STING SKIN-PREP[◊] cada 24-72 horas, dependiendo de la frecuencia de limpieza. (b) En casos extremos (p.ej. diarrea constante) en los que se precise una limpieza muy frecuente, podrán ser necesarias aplicaciones más frecuentes (p. ej. cada 12 – 24 horas).

8. No es necesario quitar NO-STING SKIN-PREP[◊] antes de la aplicación.

Caducidad

3 años.

Almacenaje

Mantenerlo en un lugar seco y a temperatura inferior a 25 °C.

Clase CE

I, estéril.

Fabricante

Fabricado en EEUU para Smith & Nephew, Inc
St Petersburg, FL 33716

Representante en Europa: Smith & Nephew Medical
Limited. Hull HU3 2BN

Presentación

Código de producto	Contenido	Cajas / embalaje	Unidad mínima de venta	Código EAN
66800710 C.N 159081.7	Frasco spray de 28 ml	12	1 unidad	5000223469641
66800712 C.N 161116.1	50 toallitas de 1ml	20	1 unidad	5000223469580
66800711 C.N 161118.5	50 torundas de 3ml	12	1 unidad	5000223469597

Curación de Heridas

Smith & Nephew, S.A.

Fructuós Gelabert, 2-4, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

Tel. Atención Cliente: 902 30 31 60

Fax. Atención cliente: 902 30 31 70

EducaciónAWM@smith-nephew.com

www.smith-nephew.com

◊ Marca registrada de Smith & Nephew