

Guía de aplicación

Prevención y cuidado de la piel

Barrera efectiva hasta 96 horas (4 días)⁽¹⁾


1. Antes de la aplicación de **NO-STING SKIN-PREP** la piel debe estar limpia y seca.
2. **Aplicación con toallita o torunda:** aplicar una capa uniforme sobre el área que se desee proteger.
Aplicación con spray: aplicar el producto a una distancia de entre 10 y 15 cm. Hasta 235 pulsaciones por botella⁽²⁾.



3. **NO-STING SKIN-PREP** se seca en aproximadamente 30 segundos.



4. Si **NO-STING SKIN-PREP** se aplica sobre un área de pliegues de la piel u otro contacto piel-piel, asegurarse de que las áreas de contacto de la piel están separadas a fin de permitir que la capa se seque completamente antes de volver a su posición normal.
5. Cuando se utilice debajo de productos adhesivos, es necesario volverlo a aplicar cada vez que se cambie el adhesivo ya que éste puede quitar la película. Asegúrese de que **NO-STING SKIN-PREP** esté seco antes de aplicar los productos adhesivos.

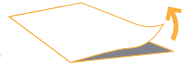

⁽¹⁾ Study to Compare the Wash-Off Resistance and Durability of a Barrier Film. Rpt # 09-58A, Cyberderm Clinical Studies, 2009.

⁽²⁾ No-Sting Barrier Spray Mean Spray Content Test. SAP 2010.

Disponible *on-line*:

tiendapreventcare.com

te lleva la prevención
a casa, en un clic 



Curación de Heridas

Smith & Nephew. S.A.U
Fructuós Gelabert 2 y 4
08970 Sant Joan Despí - Barcelona
Tel. 902 30 31 60 - Fax 902 30 31 70
www.smith-nephew.com

Indicaciones de uso

La prevención y el confort de tus pacientes, nuestra razón de ser.

NO-STING SKIN-PREP ayuda a proteger la piel ante:

- **Trauma en la retirada de apósitos:** previene el posible dolor e irritación durante la retirada de productos adhesivos (apósitos, esparadrapos, etc.), aumentando el confort del paciente.
- **Incontinencia:** protección de la piel frente a la incontinencia (urinaria y/o fecal) manteniendo la piel íntegra.
- **Fricción y humedad:** la combinación de estos dos elementos puede lesionar la piel. Prevención ante la aparición de lesiones con una cuidadosa limpieza y protección de la piel.
- **Protección de la piel perilesional:** protección de la piel ante posibles fugas (drenajes, adhesivos), evitando la maceración e irritación de la piel. Protección de la piel perilesional en: úlceras venosas, úlceras por presión, lesiones tumorales, heridas traumáticas, pie diabético, abscesos, etc.
- **Ostomías:** protección de la piel circundante a la maceración y el trauma adhesivo. Protección de la piel ante las posibles fugas en los dispositivos de ostomías (traqueostomías, colostomías, gastrostomías, gastrectomías, urostomías, colostomías, ilestomías, etc.).
- **Dispositivos de Terapia de Presión Negativa:** protección de la piel circundante ante la posible aparición de lesiones superficiales.



Presentaciones	C.N.	Código S&N
Spray de 28 ml	159081.7	66800710
Toallitas de 1 ml	161116.1	66800712
Torundas de 3 ml	161118.5	66800711



Disponible *on-line*:

tiendapreventcare.com

te lleva la prevención a casa, en un clic



Curación de Heridas

Smith & Nephew. S.A.U
Fructuós Gelabert 2 y 4
08970 Sant Joan Despí - Barcelona
Tel. 902 30 31 60 - Fax 902 30 31 70
www.smith-nephew.com